

Manuale Utente

906ELG

**Acceleratore
elettronico con
comando a radio
frequenza**



Guidosimplex

Rev.0

www.guidosimplex.it

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.

Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.

I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.

Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.


Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.

Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.




CARATTERISTICHE

Il nuovo dispositivo **906ELG** è un innovativo sistema di accelerazione manuale dotato di funzionamento Wireless. Questa caratteristica permette la gestione dell'accelerazione senza staccare le mani dal volante. Il **906ELG** una volta indossato diventa un tutt'uno con la mano e vi si adatta facilmente grazie alle sue regolazioni. Questo dispositivo è il frutto di uno studio dedicato allo sviluppo di un acceleratore diverso dagli standard attualmente utilizzati e capace di soddisfare i clienti più esigenti. Realizzato utilizzando le tecniche costruttive più avanzate mostra oltre ad un funzionamento ottimale, anche un look decisamente accattivante. Funzionalità ed estetica sono da sempre un marchio di Italianità della Guidosimplex.

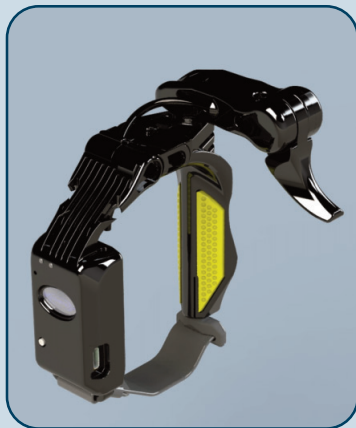

ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO

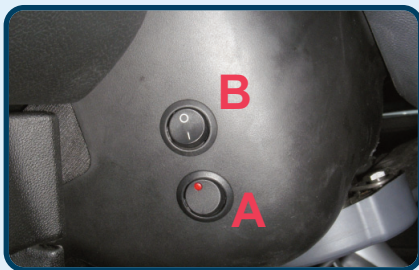


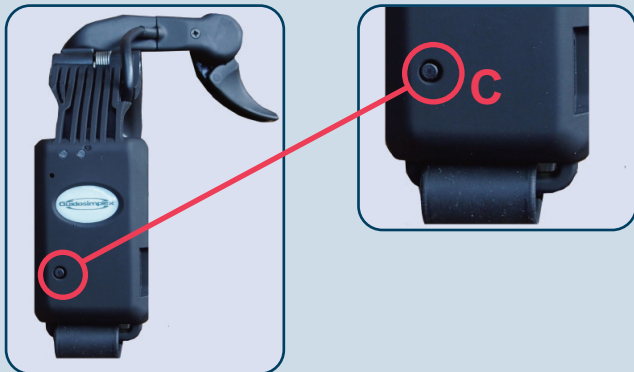
Nell'abitacolo della vettura sono presenti due interruttori installati in una posizione facilmente raggiungibile da parte dell'utilizzatore. **(A)** Interruttore **ON/OFF** tramite questo interruttore è possibile attivare e disattivare il dispositivo di accelerazione. **(B)** Spostando questo interruttore in posizione 1 si attiva la modalità 50% rendendo il controllo dell'acceleratore meno sensibile, ottimizzando così le performance in situazioni di continue e controllate variazioni di accelerazione, quali il traffico e le manovre di parcheggio.

ATTIVAZIONE


- 1) Avviare il motore
- 2) Attivare il dispositivo portando l'interruttore **(A)** in posizione on (led rosso acceso). In questa configurazione per questioni di sicurezza sia il pedale acceleratore originale che l'acceleratore Guidosimplex risulteranno non operativi.


ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO

-  3) Se il comando acceleratore wireless è stato spento dal pulsante di attivazione (C), è necessario premere e rilasciare il pulsante.



- 4) Spingere la leva freno verso l'avanti (azione di frenatura) da questo momento l'acceleratore Guidosimplex è operativo mentre il pedale acceleratore originale è disattivato.

-  Se durante l'utilizzo del dispositivo di accelerazione manuale viene premuto accidentalmente il pedale acceleratore originale, questa manovra non procurerà alcun effetto in quanto il pedale originale non è attivo durante l'utilizzo dell'acceleratore Guidosimplex e viceversa.

-  Per poter utilizzare la vettura con il pedale originale è necessario disattivare il dispositivo Guidosimplex attraverso l'interruttore (A led rosso spento).

RICARICA DEL DISPOSITIVO



MODULO TRASMETTITORE




PRESA RICARICA




CAVO USB TIPO C

Quando il livello della batteria scende al 5% il led rosso inizia a lampeggiare indicando che è necessario effettuare la ricarica. La batteria interna al trasmettitore essendo al litio non dovrebbe essere utilizzata sino al pieno esaurimento della carica, quindi quando si accende il led rosso lampeggiante è preferibile effettuare la ricarica in tempi brevi. Se il trasmettitore non è attivo, durante la ricarica il led rosso risulterà spento. Se si vuole verificare lo stato di ricarica è necessario attivare il trasmettitore, il led rosso si accenderà e rimarrà acceso fisso per tutto il periodo della ricarica. A ricarica completata si accenderà il led giallo fisso in contemporanea al led rosso (ricarica completata). La ricarica completa si ottiene in circa 4 ore

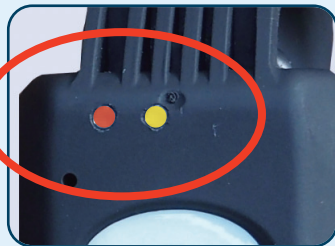


NOTE GENERALI

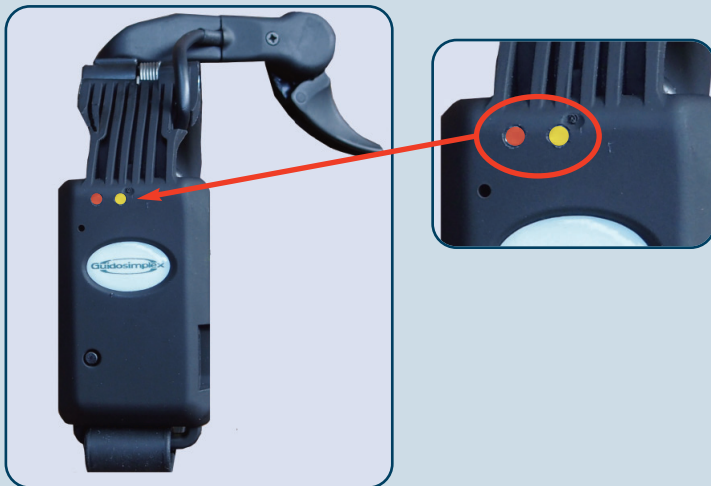

Quando il dispositivo ELG è attivo il led giallo lampeggia lentamente per qualche ciclo e poi si spegne. Successivamente è possibile accertarsi dello stato del trasmettitore mantenendo premuto il pulsante di attivazione, il led giallo inizierà a lampeggiare velocemente indicando che il trasmettitore è attivo, rilasciando il pulsante il led giallo si spegnerà automaticamente. Il led giallo lampeggiante con una cadenza di circa 5 secondi indica che il trasmettitore è attivo in attesa che il ricevitore venga attivato (il ricevitore si attiva automaticamente al momento dell'accensione del dispositivo interfaccia).

NOTE GENERALI

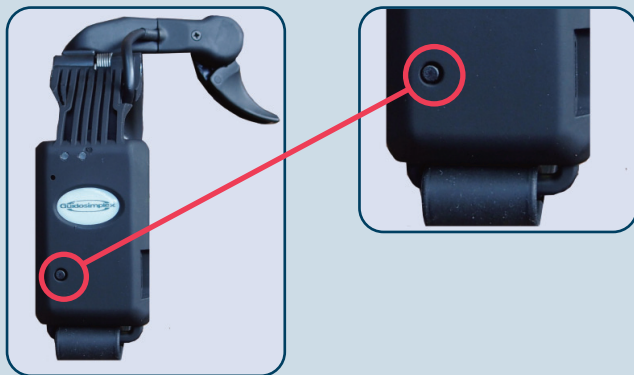

Pulsante attivazione e spegnimento del trasmettitore. Se il trasmettitore è attivo è possibile spegnerlo tenendo premuto il pulsante sino all'accensione dei led giallo e rosso rilasciando il pulsante il trasmettitore risulterà spento. Successivamente a questa operazione se si vuole utilizzare nuovamente l'acceleratore è necessario premere e rilasciare il pulsante, il trasmettitore tornerà ad essere attivo. E' consigliato effettuare questa operazione quando la vettura non viene utilizzata per lunghi periodi.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO



Inserire la mano all'interno dell'acceleratore manuale.



Posizionare il comando sul palmo della mano



Regolare tramite il cinturino l'aderenza sul palmo

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO



Azionando il grilletto si ottiene l'accelerazione

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.

Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it
www.guidosimplex.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO