

Manuale Utente

D908PS

**Inversione
acceleratore
universale**



Guidosimplex

www.guidosimplex.it

Rev.2

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.

Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.

I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.

Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.

Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.

Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.




D908PS

Questo dispositivo consente di azionare il pedale acceleratore con la gamba sinistra ed è studiato in modo che, ove necessario, si possa sfilare e ripristinare così l'uso dell'acceleratore a destra con estrema facilità. Questo dispositivo si adatta a tutte le autovetture.




SGANCIO PEDALIERA

FASE 1: Spingere la levetta di sgancio (A) per sbloccare la pedaliera.

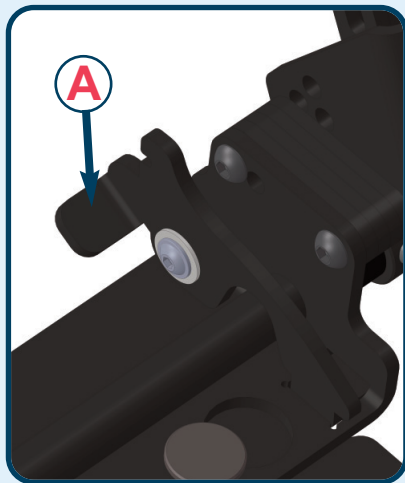


RIMOZIONE PEDALIERA

FASE 2: Tirare la pedaliera verso sinistra (B).

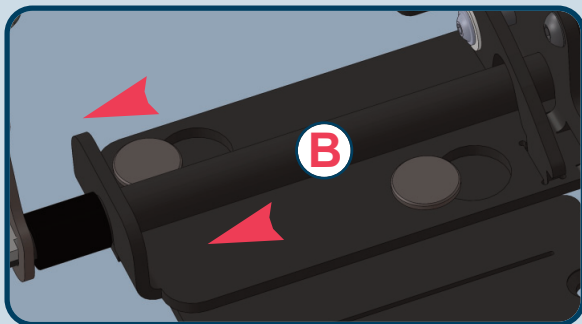


FASE 3: Tirare verso l'altro per sfilare la pedaliera (C).

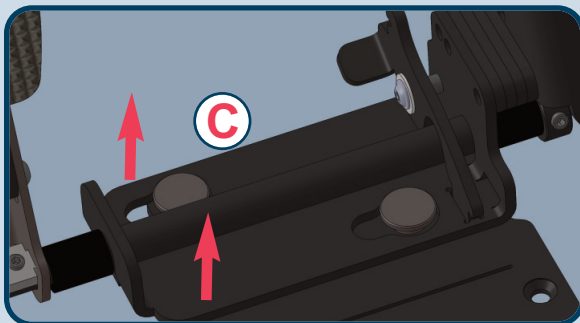

AVVERTENZE

Quando la pedaliera viene posizionata nel suo alloggiamento fare attenzione che l'innesto (A) sia inserito correttamente nel supporto (B) affinché la pedaliera sia bloccata in sicurezza.

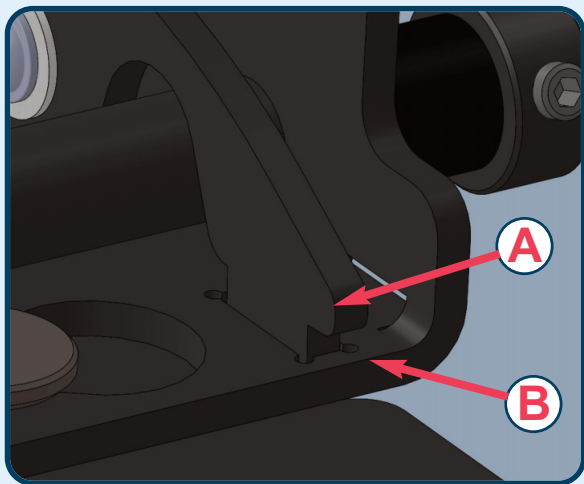

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.

Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it
www.guidosimplex.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO