

Provide you with professional mobility solutions!



LIFT&GO

TRAN-WCT

MANUALE UTENTE



INDICE

INDICE	1
PREFAZIONE.....	2
1. SERVIZIO DOPO VENDITA.....	3
2. DESCRIZIONE.....	4
2.1. Struttura Prodotto.....	4
2.2. Targhetta identificativa.....	4
3. FUNZIONAMENTO STANDARD.....	5
4. BLUETOOTH E APP.....	5
5. EMERGENZA MANUALE	6
5.1 Estrarre	6
5.2.Riporre	9
6. MANUTENZIONE	10
6.1. Manutenzione.....	10
7. RICERCA DIFETTO.....	12
7.1. Azionamento.....	12
ALEGATO 1: MANUALE USO APP.....	13

Prefazione

Grazie per aver scelto un dispositivo di Guidosimplex.

I nostri prodotti sono disponibili in 28 paesi nel mondo

Questo manuale include la dichiarazione post-vendita, l'introduzione del prodotto e istruzioni operative

In caso di problemi nel processo di utilizzo, si prega di contattare Guidosimplex, Vi forniremo una soluzione tempestiva e soddisfacente.

La versione di questo manuale è :V1.0.

Guidosimplex si riserva il diritto di modificare il presente manuale senza obbligo di preavviso

GUIDOSIMPLEX srl - Via del Podere S. Giusto, 29 - 00166 Roma (Italy) Tel.
+39 06.6152801 - Fax +39 06.61528036 - Email infoclient@guidosimplex.it

www.guidosimplex.it

1 Post Vendita

Garantiamo agli acquirenti che ripareremo o sostituiremo qualsiasi parte non funzionante a causa di un difetto materiale o di lavorazione durante il periodo di garanzia. I dettagli sono i seguenti:

1.1 Periodo Garanzia:

Durata: 12 mesi dalla installazione

Riparare o sostituire componenti difettose o con difetti di costruzione durante il periodo coperto da garanzia. Le parti saranno messe a disposizione da Guidosimplex.

1.2 Servizio Post-Vendita

Se si è verificato un problema, contattare Guidosimplex o inviare e-mail a infoclient@guidosimplex.it, analizzeremo il problema e forniremo una soluzione al più presto possibile.

Se il problema è riscontrato a causa di materiale difettoso o difetto di lavorazione, forniremo gratuitamente la parte per la sostituzione.

Se è necessario restituire una parte per la riparazione, si prega di darci il preavviso più ampio possibile, e consentirci il ragionevole tempo per ripararlo.

Le spese di spedizione per la restituzione delle parti a Guidosimplex sono a carico responsabilità del cliente. Guidosimplex pagherà le spese di spedizione al momento della restituzione delle parti soggette a garanzia al cliente. Guidosimplex non accetterà beni restituiti se non preventivamente autorizzati.

La garanzia non copre: malfunzionamenti o danni a parti causati da incidenti, uso improprio, mancanza di una corretta manutenzione, regolazione inadeguata, alterazione, meccanica del veicolo, pericoli, sovraccarico, mancata osservanza delle istruzioni operative o di natura fisica (ad es. fulmine e inondazioni).

L'obbligo di Guidosimplex ai sensi della garanzia è limitato esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione di parti che non superano il periodo di garanzia applicabile.

Guidosimplex non si assume alcuna responsabilità per spese o danni, inclusi incidentali o danni consequenziali.

1.3 Note e Raccomandazioni


Guidosimplex consiglia di ispezionare questo prodotto ogni sei mesi, e di fare manutenzione in quel momento. Dettagli di manutenzione possono essere trovati nel Manuale Utente.

Questo dispositivo è stato progettato e fabbricato secondo specifiche esatte. La garanzia è nulla se: la modifica a qualsiasi parte di questo dispositivo non è stata autorizzata da Guidosimplex.

Guidosimplex non ha alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà dovuti al funzionamento del dispositivo che è stato modificato rispetto al nostro progetto originale.

Nessuno è autorizzato a modificare il dispositivo in assenza di autorizzazione scritta da parte di Guidosimplex.

2. Descrizione

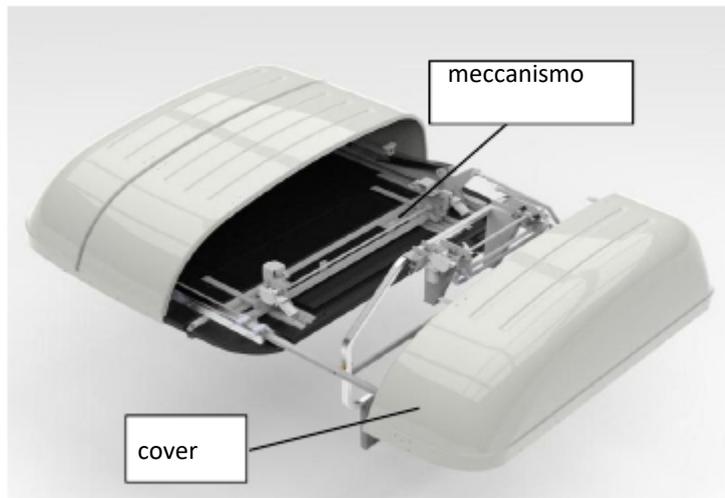

2.1. Struttura prodotto

No	Nome	Descrizione
1	meccanismo	Dispositivo di funzione
2	coVer	Cover del Meccanismo
3	Comando a Filo	Per pilotare le funzioni

2.2. Traghetta Identificativa

C'è una targhetta che è incollata sul coperchio. Puoi trovare informazioni sul prodotto, come nome del prodotto, modello, tensione, numero di serie, data e così via. Il numero seriale è unico ed è necessario fornirlo per il servizio post-vendita.



**NON MODIFICARE IL NOSTRO PRODOTTO, POTREBBE CAUSARE DANNI
E INVALIDARE LA GARANZIA.**

3. Funzionamento Standard



Telecomando:

Quando la porta è aperta, premere il pulsante "SU" per estendere la sedia a rotelle; premere pulsante "GIÙ" per riporre la sedia a rotelle. Se si rilascia il pulsante, ogni movimento verrà interrotto

4. Bluetooth and APP

Questo sistema può essere gestito tramite APP.

Scarica la APP sul tuo cellulare e tramite il bluetooth potrai gestire il sistema

5. Funzioni Manuali di Emergenza



Questo dispositivo può essere azionato manualmente in caso di emergenza in caso in cui si siano verificati malfunzionamenti. Una volta che sarà stato ripristinato il sistema manualmente, si prega di portare la vostra auto per manutenzione immediata per evitare incidenti più gravi. Fare riferimento ai passaggi seguenti per conoscere le funzioni manuali di emergenza.

5.1 Estrarre la Sedia a Rotelle

Passo 1: Utilizzare la funzione manuale per distanziare gli ingranaggi dal motore


(I denti degli ingranaggi dalla cremagliera di scorrimento orizzontale).



Rimuovere i tappi di gomma




Rimuovere il fermo dal gancio

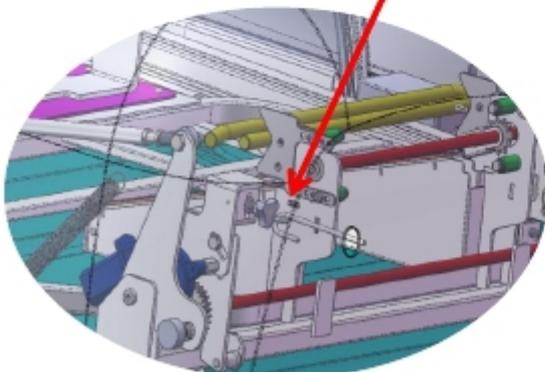



Ruotare manualmente con il tubo di alluminio in dotazione in senso antiorario fino a che la rotazione si arresta e quindi gli ingranaggi si sono distaccati dalla cremagliera

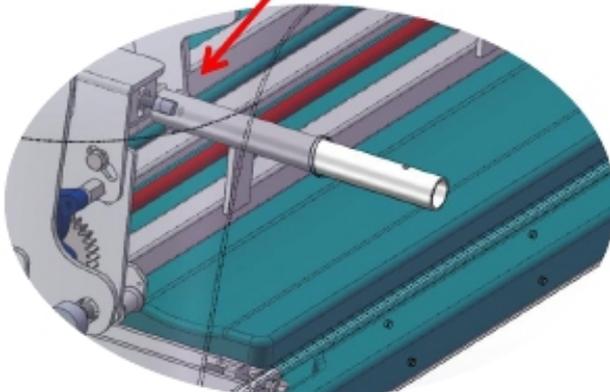

Passo 2.: Aprire manualmente il coperchio mobile facendolo scorrere all'esterno fino a quando il telaio di sollevamento è perpendicolare al suolo



Passo 3: Utilizzare la funzione manuale per staccare completamente i denti del motore dall'albero di trasmissione. Fare la massima attenzione tendendo la sedia a rotelle e abbassandola lentamente per evitare che cada improvvisamente a terra una volta liberato il sistema.



5.2. Riporre la Sedia a Rotelle

Passo 1: Ruotare manualmente l'albero di trasmissione, riportare la catena nella scatola della catena, riposizionare le maglie della catena sui denti del motore di sollevamento e dell'albero di scorrimento, quindi inserire il perno R



Passo 2: Chiudere la copertura spingendo all'interno la stessa .



STEP 3: Serrare l'ingranaggio con l'apposito strumento.



non mettere la sedia a rotelle all'interno in caso di avaria per la quale il sistema è stato richiuso con il sistema manuale di emergenza

6. Manutenzione



La manutenzione regolare massimizzerà le prestazioni del prodotto e ridurrà la necessità di riparazioni

Si consiglia di pulire e mantenere il prodotto regolarmente per prevenire che lo sporco e altre cose che possano cadere nel meccanismo possano causare resistenze e blocchi che possono danneggiare il meccanismo.

Si consiglia di pulire e mantenere il meccanismo almeno una volta al mese.


6.1. Manutenzione

La manutenzione giornaliera consta principalmente nel controllo del corretto funzionamento, se ad esempio è presente un allentamento dei punti di connessione e del cablaggio.

Si consiglia di controllare almeno una volta ogni 6 mesi.

L'ispezione deve includere quanto segue :

- **Ispezione 1:** Se il movimento orizzontale è liscio.
Pulire e lubrificare sempre l'interno della guida e la guida di scorrimento

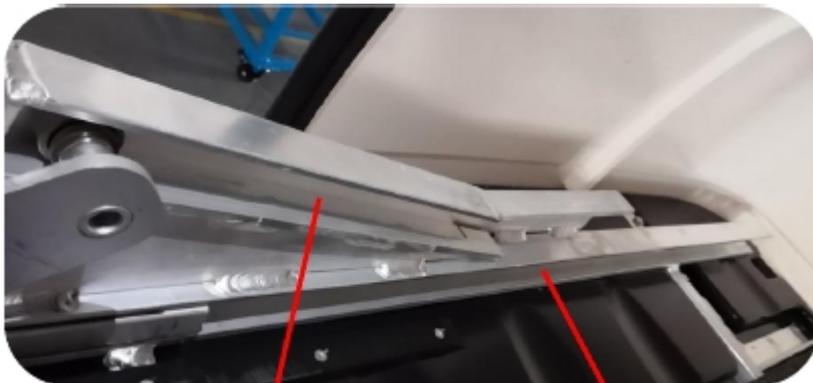

Interno guida rulli

Interno della guida

➤ Ispezione 2: connettori e supporto .



Se si è allentato il
Supporto cablaggio.



Se si è allentato
un connettore

7. Ricerca Difetto



Seguire quanto segue per identificare malfunzionamenti

7.1. Si preme il pulsante del telecomando e non succede nulla

Possibile Causa:

1. Il connettore elettrico si è staccato o danneggiato.
2. Componenti o connettori della centrale di controllo si sono staccati o danneggiati .
3. Il telecomando a filo si è perso , danneggiato o staccato .
4. Il voltaggio della batteria del veicolo è basso o inesistente .

Come Riparare :

1. Riattaccare I connettori;
2. Sostituire la centralina di controllo;
3. UseUsare un multimetro per verificare lo stato della batteria ;

ALLEGATO 1

Operatività tramite mobile APP

Il prodotto può essere controllato tramite APP mobile, il processo di abbinamento tra il telefono cellulare dell'utente e il dispositivo è il seguente:

- ① Scarica l'APP mobile dal nostro sito Web o scansiona il codice QR per scaricarlo;
- ② Ripristinare la piattaforma, quando la piattaforma è retratta, tenere premuto i tasti "SU" e "GIU" per 10 secondi simultaneamente, il cicalino emette un lungo bip;
- ③ Apri l'APP e fai clic sulla barra dei menu nell'angolo in alto a sinistra (vedi figura 5-1-1);

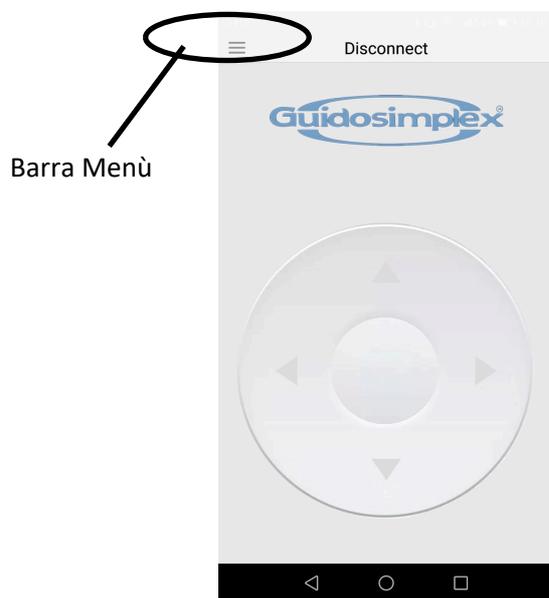


figura 5-1-1

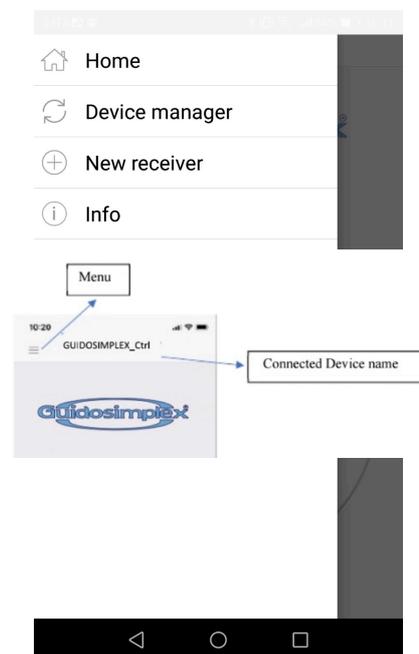


figura 5-1-2

- ④ Fare clic su "Nuovo Dispositivo" e fare clic sul dispositivo rilevato (vedere la figura 5-1-2);
 - ⑤ Corrispondenza completata: una volta completata l'associazione, può essere utilizzata normalmente.
- I 4 pulsanti chiave nell'APP hanno la stessa funzione dei pulsanti del comando a filo; la volta successiva quando apri l'APP, il telefono si conatterà automaticamente al dispositivo, ovvero l'utente può fare clic manualmente all'interno del menù dispositivi, per connettere il dispositivo che desidera.



GUIDOSIMPLEX srl - Via del Podere S. Giusto, 29 - 00166 Roma (Italy) Tel. +39 06.6152801 - Fax
+39 06.61528036 - Email infoclient@guidosimplex.it

www.guidosimplex.it